

カールタイプ
ウルタン素材使用

救急絆創膏

ピッタリフィットのわん曲形状

第3類医薬品

カールバンN[®]

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ

効能又は効果

切り傷, すり傷, さし傷, かき傷, 靴ずれ, 創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口に当たるように貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- (4) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (5) 貼る際は、引っ張らないで軽く圧着してください。
- (6) ヨードチンキと同時に使用しないでください(アクリノールの殺菌力を弱めます。)
- (7) 皮膚の弱い人は絆創膏部分を同じ所に続けて貼らないでください。

成分及び分量

パッド100g中 アクリノール水和物 0.8g

添加物として、マクロゴール、メチルセルロース、ガーゼを含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：076-479-1313

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

内容 19mm×70mm 24枚入

製造販売元  大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173



箱 外装フィルム